



BHV
plus

Postbus 7073

2701 AB Zoetermeer

Forerunner 2 AED

(informatiebron Laerdal)

Heartstream FR2 (ForeRunner)

ForeRunner is bijzonder gemakkelijk te leren en te gebruiken. Het instrument is kleiner dan een notebook-PC en weegt slechts 2 kilo. Hang hem aan de muur naast de eerste-hulp kit, dan pakt u hem net zo snel mee als een schoudertas, of schuif hem onder een autostoel. Hij is altijd klaar voor gebruik, waar en wanneer u hem maar nodig hebt. Bovendien is ForeRunner stevig en duurzaam, berekend op intensief gebruik onder alle omstandigheden.

Innovatieve technologie: bifasische curve

ForeRunner redt levens door energie af te geven in de vorm van een bifasische curve. Deze methode heeft haar nut bewezen bij implanteerbare defibrillatoren. Een bifasische curve heeft minder energie nodig dan de traditionele monofasische curve om effectief te defibrilleren. De American Heart Association heeft vastgesteld dat de energiezuinige SLIMME Bifasische curve "veilig, aanvaardbaar en klinisch effectief" is. Door toepassing van bifasische curven kan Philips Heartstream haar ForeRunner kleiner, lichter, voordeliger en betrouwbaarder maken.

Automatisch afgestemd op elke individuele patiënt


Elk individu is anders gebouwd. Borstomvang, vorm en densiteit zijn allemaal factoren die de borstimpedantie van een patiënt bepalen. Helaas compenseren monofasische defibrillatoren de borstimpedantie niet tijdens de ontlading. Daarom kan deze "universele-maat" ontlading voor sommige patiënten te sterk zijn en voor andere te zwak. Met ForeRunner's SLIMME bifasische technologie wordt de borstimpedantie direct gemeten en wordt de curvevorm bij elke ontlading automatisch volledig afgestemd op de betreffende patiënt.

Uitzonderlijk slimme technologie betekent heel weinig onderhoud

Philips Heartstream's ForeRunner is zo ontworpen dat hij altijd gebruiksklaar is. De disposable lithium batterijen gaan lang mee en zijn aanzienlijk kleiner en lichter dan de batterijen die in andere defibrillatoren worden toegepast. Ze zijn uiterst betrouwbaar - kunnen vijf jaar worden bewaard - hun technologie is vergelijkbaar met die van batterijen in implanteerbare defibrillatoren. Bovendien is opladen niet nodig om ForeRunner altijd standby en klaar voor gebruik te houden.

Automatische zelftest zorgt voor optimale prestaties

Zodra een batterij is geplaatst, voert ForeRunner automatisch zijn dagelijkse zelftests uit. Schakelingen, interne componenten en batterijcapaciteit worden elke dag automatisch gecontroleerd. De resultaten leest u af op de statusindicator. Zo ziet u in een oogopslag dat ForeRunner klaar is voor gebruik.

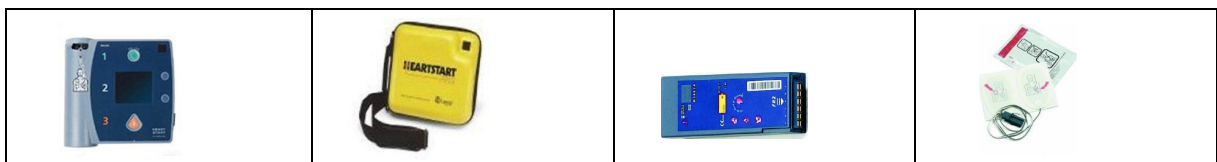

Opleidingen & Trainingen, levering van goederen en betalingsvoorwaarden geschieden op basis van de algemene voorwaarden van BHV Plus, gedeponneerd bij de KvK te Haaglanden
Opleidingen, Trainingen, Cursussen en Oefeningen worden gegeven volgens de geldende richtlijnen van de NIBHV, Oranje Kruis, NRR, ERC en NIBRA.

Tel. 079-5938424 ~ Fax. 079-5938425 ~ GSM. Nr. 06-24863839
BTW-nr.1814.32.924 ~ Handelsregister 27246156
Postbank rekening 9188759 ~ ING Bank rekening 67.70.29.780